



SÅDAN FÅR DU **DET BEDSTE** UD AF DIN **WIDEX BEYOND**[™] LØSNING

Tillykke med dit nye WIDEX BEYOND[™] høreapparat. Denne guide er en hjælp til at give dig den bedst mulige oplevelse med dine nye høreapparater.

BEYOND høreapparaterne skaber forbindelse til din iPhone gennem en strømbesparende version af 2,4 GHz Bluetooth for at sikre lang batterilevetid.

Når du streamer fra iPhone til BEYOND indendørs, er den trådløse forbindelse effektiv, fordi radiobølgerne kan prelle af på de omgivende overflader (vægge og lofter). Når du streamer udendørs, er den mindre effektiv, da der er færre omgivende overflader. Radiobølger kan samtidig svækkes en smule, hvis de skal bevæge sig gennem menneskekroppen.

Derfor opnås den mest effektive forbindelse, når du er indendørs og har telefonen i hånden eller på bordet foran dig. Hvis du er udendørs og f.eks. har telefonen i bukselommen, kan forbindelsen være mindre effektiv.

For at opnå den bedste streamingforbindelse udendørs anbefaler Widex, at du holder telefonen i hånden eller har den i en skjortelomme. Du kan også have telefonen i et armbånd til udendørs sportsaktiviteter.

Kvaliteten af den streamede lyd kan forbedres yderligere ved at slå WIFI fra.

