



SÅ HÄR FÅR DU **UT DET MESTA** AV DIN **WIDEX** **BEYOND™-LÖSNING**

Grattis till ditt inköp av WIDEX BEYOND™-hörapparater. Denna guide hjälper dig att få den bästa upplevelsen med dina nya hörapparater.

Dina BEYOND-hörapparater ansluts till din iPhone med en lågeffektsversion av 2,4 GHz Bluetooth för att säkerställa lång batteritid.

När du strömmar från iPhone till BEYOND inomhus är den trådlösa anslutningen stark eftersom radiovågorna kan studsas mot omgivande ytor. Den är mindre stark vid strömning utomhus eftersom det finns färre omgivande ytor. Radiovågorna kan också försvagas något eftersom de färdas genom människokroppen.

Därför är anslutningen som starkast när du är inomhus och har telefonen i handen eller på bordet framför dig. Anslutningen kommer att vara mindre stark när du är utomhus och till exempel har telefonen i byxfickan.

För den bästa strömningsanslutningen utomhus rekommenderar Widex att du har telefonen i handen eller skjortfickan. Du kan också bära telefonen i ett armband för sportaktiviteter när du är utomhus.

Strömningens ljudkvalitet kan förbättras ytterligare genom att wi-fi stängs av.

