



MITEN SAAT **PARHAAN** HYÖDYN **WIDEX BEYOND**[™] -RATKAISUSTA

Onnittelut WIDEX BEYOND[™] -kuulokojeiden hankinnasta. Tämän oppaan avulla saat parhaan hyödyn uusista kuulokojeistasi.

BEYOND-kuulokojeet muodostavat yhteyden iPhoneen vähän virtaa kuluttavan 2,4 GHz:n Bluetooth-yhteyden kautta, millä varmistetaan pitkä pariston kesto.

Kun iPhonea suoratoistetaan ääntä BEYOND-kuulokojeisiin sisätiloissa, langaton yhteys on vahva, koska radioaalto voivat heijastua ympäröiviltä pinnoilta. Ulkotiloissa suoratoistettaessa yhteys on heikompi, koska heijastuspintoja on vähemmän. Lisäksi radioaaltojen eteneminen ihmiskehon läpi voi hieman heikentää radioaaltoja.

Yhteys on vahvin sisätiloissa, kun puhelin on kädessä tai edessä olevalla pöydällä. Jos olet ulkotiloissa ja puhelin on esimerkiksi housujen taskussa, yhteys voi olla heikompi.

Ulkotiloissa saadaan paras suoratoistoyhteys, kun puhelinta pidetään kädessä tai paidan taskussa. Ulkona urheillessa puhelinta voi pitää myös käsivarsikotelossa.

Lisäksi Wi-Fin poistaminen käytöstä voi parantaa suoratoiston äänenlaatua.

