

WIDEX ZEN²GO™

MODE D'EMPLOI WIDEX ZEN²GO™

C2-PA (RIC)

Solution destinée à soulager les acouphènes



SOMMAIRE

LES SYMBOLES	3
DESCRIPTION	4
Les indications d'utilisation.....	6
Indicateurs acoustiques.....	7
La pile.....	8
L'insertion de la pile.....	8
Indication que la pile est épuisée.....	10
Allumer et éteindre l'appareil.....	11
Positionnement de l'appareil.....	12
Retrait de l'appareil.....	13
Réglage du volume.....	14
Programmes d'écoute.....	15
Passer d'un programme à un autre.....	15
Le nettoyage.....	18
Le nettoyage de l'appareil.....	19
Nettoyage du système de maintien auriculaire.....	20
Positionnement du dôme sur le fil écouteur.....	22
LE PARE-CÉRUMEN NANOCARE	23
Comment remplacer le pare-cérumen ?.....	24
L'ANCRE	26
LA RADIOCOMMANDE RC-DEX	29
EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT	30
COMMENT PRENDRE SOIN DE VOS APPAREILS ?	32
AVERTISSEMENTS	33
CONSEILS	36
REGULATORY INFORMATION	37

LES SYMBOLES

Dans ce mode d'emploi, vous trouverez les symboles suivants :



AVERTISSEMENT

Les messages commençant par cet intitulé indiquent des réactions indésirables, des risques potentiels de danger et une performance inadéquate de l'appareil.



MISE EN GARDE

Les messages commençant par cet intitulé vous informent sur une précaution toute particulière à prendre.




■ Ne pas jeter avec les ordures ménagères ordinaires.

DESCRIPTION

Le coffret WIDEX ZEN2GO comprend deux appareils C2-PA pour soulager les acouphènes et une radiocommande RC-DEX. Les appareils sont fournis avec des systèmes de maintien auriculaire composés d'un fil écouteur et d'un dôme ouvert dans lequel est positionné l'écouteur. Les appareils utilisent une technologie sans fil brevetée, le WidexLink, qui leurs permettent de communiquer entre eux. Ils sont dotés de programmes d'écoute Zen produisant des tonalités musicales et/ou un bruit reproduisant le son de l'océan.

Vous trouverez ci-dessous les spécificités de l'aide auditive :

1. Entrée des microphones
2. Tiroir-pile (fonction marche/arrêt)
3. Ergot
4. Fil écouteur
5. Écouteur
6. Dôme
7. Pare-cérumen
8. Ancre

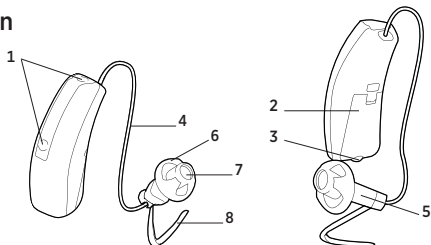



AVERTISSEMENT

Ce livret contient des informations et des instructions importantes. Veuillez le lire attentivement avant de commencer à utiliser les appareils destinés à soulager les acouphènes.

REMARQUE

Les descriptions de ce manuel s'appliquent aux deux appareils. Veuillez également lire «Mode d'emploi - La radiocommande RC-DEX pour les solutions Widex destinées à soulager les acouphènes».

Les indications d'utilisation

Le programme Zen est destiné à produire un fond sonore relaxant. Il est réservé aux adultes de 21 ans et plus. Il peut être prescrit par un audioprothésiste agréé (experts en audiologie, spécialiste ORL), au cours d'une thérapie par le son visant à soulager les acouphènes.

Indicateurs acoustiques

Les appareils auditifs peuvent être programmés pour qu'un signal sonore indique les fonctions suivantes :

Fonctions	Réglages
Réglage du volume via la radiocommande	Bip
Confirmation de l'utilisation de la touche de sélection des programmes de la RC	Clic sonore
Changement de programme via la radiocommande	Clic sonore
Démarrer l'appareil	Bip
Avertissement indiquant que la pile est épuisée	4 bips

La pile

Nous vous recommandons d'utiliser **des piles de type Zinc Air de taille 10**.

Si vous souhaitez des piles de remplacement, veuillez contacter votre audioprothésiste. Il est important de noter la date limite d'utilisation et de bien lire les recommandations concernant le recyclage des piles usagées sur l'emballage.




L'insertion de la pile

Avant d'insérer une nouvelle pile dans l'appareil, n'oubliez pas d'ôter l'étiquette adhésive. La pile commencera à fonctionner quelques secondes après le retrait de cette étiquette.



MISE EN GARDE

N'utilisez pas une pile sur laquelle il resterait un résidu collant de l'étiquette ou une autre substance indésirable. Cela pourrait occasionner un dysfonctionnement de l'appareil.

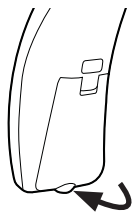

Utilisez l'ergot pour ouvrir doucement le tiroir-pile. Ne forcez pas sur le tiroir-pile au-delà de sa position d'ouverture maximale.

Placez la pile dans le tiroir comme sur l'illustration de façon à ce que le signe plus (+) sur la pile soit orienté vers vous lorsque vous tenez l'appareil. Vous pouvez vous aider de l'aimant pour guider la pile dans son logement.



Si vous avez des difficultés à fermer le tiroir-pile, vérifiez que la pile est correctement positionnée.

Lorsque vous remplacez la pile, nous vous conseillons de le faire au-dessus d'une table.

Indication que la pile est épuisée

Lorsque la pile sera sur le point d'être épuisée, un indicateur acoustique émettra un son à moins que cette fonctionnalité ait été désactivée. La durée de fonctionnement exacte de l'appareil après l'indication de l'épuisement de la pile est variable. Nous vous recommandons de toujours avoir une pile de réserve sur vous.




AVERTISSEMENT


Ne laissez jamais une pile épuisée dans l'appareil. Elle pourrait couler et l'endommager.

Allumer et éteindre l'appareil

Le tiroir-pile de l'appareil fait également office d'interrupteur marche/arrêt.

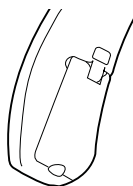

Fermez le tiroir-pile pour allumer l'appareil. Un signal sonore vous indiquera que l'appareil a été allumé à moins que cette fonctionnalité ait été désactivée.

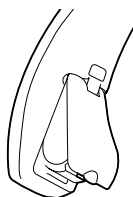


Pour éteindre l'appareil, ouvrez le tiroir-pile.

N'oubliez pas d'éteindre l'appareil lorsque vous ne vous en servez pas. Si vous ne devez pas vous en servir pendant plusieurs jours, ôtez même la pile.

Positionnement de l'appareil

Insérez l'embout dans le conduit auditif tout en tenant la partie basse du fil écouteur. Pour faciliter le processus, vous pouvez tirer le pavillon de votre oreille vers l'arrière avec l'autre main.

Placez l'appareil derrière l'oreille afin qu'il repose confortablement sur votre oreille.

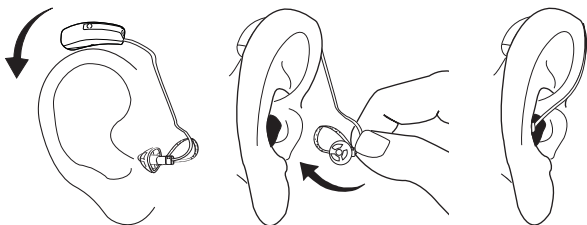


Pour les dômes ouverts, l'utilisation d'une ancre permet de bien maintenir l'appareil dans l'oreille. Veuillez vous référer à la section : L'ancre.

Retrait de l'appareil

Retirez l'appareil de derrière votre oreille.

Sortez doucement le dôme du conduit auditif tout en tenant la partie inférieure du fil écouteur.

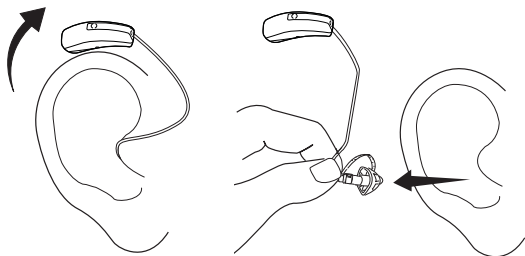

Réglage du volume

La radiocommande vous permet d'effectuer un réglage du volume. Tout réglage du volume par la radiocommande affectera les deux appareils.

Veillez également consulter le mode d'emploi de la radiocommande.



MISE EN GARDE

Si le volume de l'appareil est généralement trop élevé ou trop faible, si les sons reproduits sont déformés ou si vous souhaitez davantage d'informations, veuillez vous adresser à votre audio-prothésiste.

Pour couper le son de l'appareil avec la radiocommande :

Sur la radiocommande, maintenez la touche du réglage du volume enfoncée. Vous entendrez un long bip. Relâchez la touche une fois que le signal sonore aura cessé. Une brève pression des touches permettant de régler l'intensité du volume réinitialisera le son.

Programmes d'écoute

Vos appareils possèdent un programme de démarrage et trois programmes de stimulations sonores appelés les programmes Zen.

Démarrage	Les appareils sont préprogrammés à 10 dB HTL et sans tonalité Zen ou bruit Zen.
Zen A	Tonalités
Zen B	Tonalités et bruit
Zen C	Bruit

Passer d'un programme à un autre

Lorsque vous allumez vos appareils pour soulager les acouphènes, ils seront réglés sur le programme de démarrage. Depuis ce programme, vous pouvez accéder au programme Zen en appuyant longuement (plus d'une seconde) sur la touche de sélection des programmes de la radiocommande. Une pression brève vous permettra ensuite de consulter les programmes Zen disponibles. Vous pouvez retourner au programme de démarrage en appuyant sur la touche de sélection des programmes et en la maintenant enfoncée pendant plus d'une seconde.

Les programmes Zen

En raison des façons uniques dont Zen est programmé dans vos appareils, veuillez suivre les recommandations de votre audioprothésiste sur la façon d'utiliser les programmes, quand les utiliser et/ou combien de temps les utiliser.



MISE EN GARDE

L'utilisation de différents programmes Zen peut interférer avec l'écoute de sons environnants y compris la parole. Nous vous recommandons de ne pas utiliser Zen lorsque l'écoute de tels sons est capitale.



MISE EN GARDE

Si, après deux jours d'utilisation, vous constatez une diminution de l'intensité, de la tolérance aux sons, ou encore une parole moins claire ou des acouphènes qui s'aggravent, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Les avantages

Le programme Zen produit un fond d'écoute relaxant. Lorsque le programme Zen est utilisé pour la gestion des acouphènes, son écoute pourra soulager l'acouphénique.

Précautions


Pour garantir la sécurité et l'efficacité des programmes Zen lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre du traitement des acouphènes, le programme de gestion des acouphènes doit être conçu et réalisé par des audioprothésistes formés sur la gestion des acouphènes et doit inclure une évaluation audiologique complète, un diagnostic des acouphènes, un suivi sous forme de conseils, une utilisation correcte de l'amplification et/ou des outils destinés à la thérapie par le son.

Avant tout programme de gestion des acouphènes, demandez conseils à votre médecin pour épuiser toutes les options de traitement médical ou chirurgical.


Utilisez vos appareils et les programmes Zen en suivant les conseils et la marche à suivre recommandés par votre audioprothésiste.

Le nettoyage

Pour nettoyer votre appareil et le système de maintien auriculaire, utilisez le petit chiffon livré avec l'ensemble.

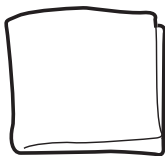

Adressez-vous à votre audioprothésiste si vous avez besoin d'un nouveau petit chiffon.

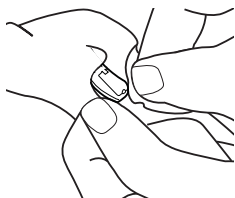


Le nettoyage de l'appareil

Après utilisation, essuyez l'appareil avec le petit chiffon doux qui l'accompagne.



AVERTISSEMENT

N'utilisez **jamais** d'eau ou de solvants pour nettoyer l'appareil, étant donné que cela pourrait nuire à son bon fonctionnement.

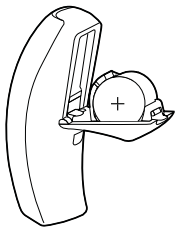

Lorsque vous ne vous servez pas de votre appareil, nous vous conseillons de le garder dans un lieu chaud et sec en laissant le tiroir-pile ouvert pour l'aérer et lui permettre de sécher.


Nettoyage du système de maintien auriculaire

Assurez-vous que le **système de maintien auriculaire** est toujours propre et qu'il ne présente pas de trace de cérumen, ni de trace d'humidité ou de substance semblable.



AVERTISSEMENT

N'utilisez jamais d'alcool ou autres solvants pour nettoyer le système de maintien auriculaire. Cela pourrait le décolorer.

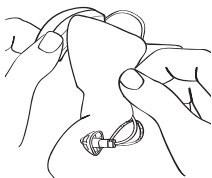

Après utilisation, nettoyez le **fil écouteur** avec un petit chiffon.



AVERTISSEMENT

N'utilisez **jamais** d'eau ou de solvants pour nettoyer le fil écouteur. L'écouteur ne doit **jamais** entrer en contact avec l'eau. Cela pourrait l'endommager.

Si de la saleté s'est amassée sur l'écouteur, sortez l'écouteur du dôme, puis essuyez-le avec le petit chiffon.



Si nécessaire, vous pouvez rincer le dôme à l'eau tiède, **après l'avoir détaché du reste du système de maintien auriculaire**. Laissez-les sécher toute la nuit.

Positionnement du dôme sur le fil écouteur

Insérez doucement l'écouteur à l'extrémité du fil écouteur dans le dôme jusqu'à ce qu'il touche l'extrémité. Vous devez impérativement vous assurer que l'extrémité du dôme est solidement fixée.




LE PARE-CÉRUMEN NANOCARE

Le pare-cérumen NanoCare aide à protéger l'appareil du cérumen. Utilisez toujours des pare-cérumen NanoCare avec votre appareil. L'absence de pare-cérumen sur votre appareil invaliderait la garantie.

Le pare-cérumen est composé des éléments suivants :

1. Support
2. Crochet de retrait
3. Pare-cérumen

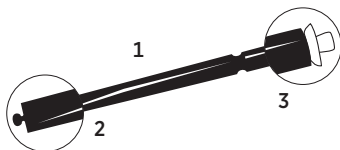


MISE EN GARDE

Le pare-cérumen est jetable et ne doit pas être réutilisé. N'essayez pas de nettoyer ou de réutiliser un pare-cérumen. Cela pourrait endommager votre appareil et/ou occasionner un déplacement du pare-cérumen dans votre oreille.

Comment remplacer le pare-cérumen ?


1. Détachez le dôme du fil écouteur.
2. Insérez le crochet de retrait dans le pare-cérumen usagé qui se trouve dans le canal de la sortie du son.
3. Retirez le pare-cérumen sans le vriller.

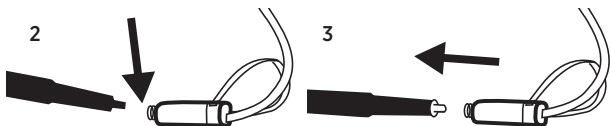

Puis retournez le support de façon à ce que le pare-cérumen usagé soit éloigné de l'écouteur et que le nouveau soit en position d'insertion.

4. Insérez le support dans l'ouverture du canal de sortie du son et enfoncez doucement le pare-cérumen sur l'écouteur.
5. Retirez le support en le maintenant bien dans l'axe. Le nouveau pare-cérumen se détachera automatiquement du support. Appuyez doucement l'écouteur sur une surface plane pour s'assurer que le pare-cérumen reste en place.
6. Positionnez le dôme sur le fil écouteur.



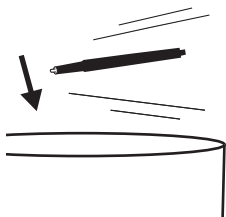

Jetez le support et le pare-cérumen utilisé.

La fréquence de remplacement du pare-cérumen varie d'une personne à l'autre.

Si vous avez des questions concernant votre pare-cérumen, veuillez contacter votre audioprothésiste.




AVERTISSEMENT

Si le pare-cérumen ne s'enfonce pas bien, jetez-le et insérez-en un autre. Si le pare-cérumen se détache pendant que le dôme est positionné dans le conduit auditif, veuillez contacter votre médecin. N'essayez pas d'extraire vous-même le pare-cérumen de votre conduit auditif.

L'ANCRE



L'ancre est fournie séparément du reste du système de maintien auriculaire et peut être utilisée de différentes façons. Nous montrons tout d'abord comment l'ancre peut être utilisée sans avoir été préalablement sectionnée :

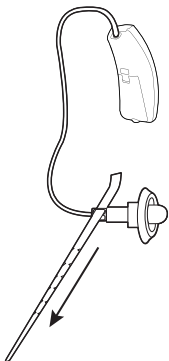

Faites passer l'extrémité pointue de l'ancre par l'orifice supérieur de l'écouteur situé à l'extrémité du fil écouteur.


La petite butée rectangulaire doit être orientée vers l'appareil.

Continuez de tirer jusqu'à ce que l'ancre soit stoppée par la petite butée située à l'extrémité.




Votre système de maintien auriculaire est désormais prêt à être utilisé. Positionnez-le de façon à ce qu'il repose agréablement dans votre oreille.

L'ancre peut être sectionnée de manière à s'adapter à votre oreille.

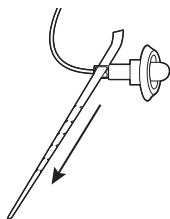

Faites passer l'extrémité pointue de l'ancre par l'orifice supérieur de l'écouteur situé à l'extrémité du fil écouteur. La petite butée rectangulaire doit être orientée vers l'appareil.

Continuez de tirer jusqu'à ce que l'ancre soit stoppée par la petite butée située à l'extrémité. Retournez le système de maintien auriculaire.

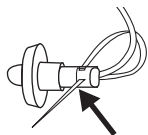


Puis, faites passer l'extrémité pointue de l'ancre par l'orifice inférieur pour former une boucle.



Lorsque la boucle a la taille qui convient, coupez tout excédent pour ne laisser que la boucle.




La taille de la boucle est appropriée lorsqu'elle supporte la position du dôme dans le conduit auditif et que le système de maintien auriculaire est correctement sis dans et sur l'oreille.

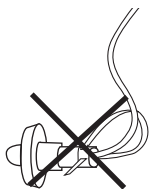

Prenez soin de bien couper tout ce qui dépasse de façon à ce que l'extrémité de la boucle de l'ancre soit de niveau avec le petit orifice et qu'il n'y ait pas de bords coupants. Passez le bout de votre doigt sur les bords pour vérifier qu'ils ne sont pas coupants. Si une partie de l'ancre sort de l'orifice, et crée une surface irrégulière, cela pourrait irriter votre oreille.

LA RADIOCOMMANDE RC-DEX

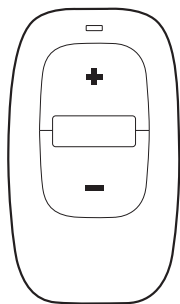

Vos appareils sont accompagnés d'une radiocommande. Veuillez consulter pour plus d'informations le mode d'emploi «La radiocommande RC-DEX pour les solutions Widex destinées à soulager les acouphènes».

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

Problème	Cause potentielle	Solution
L'appareil est silencieux	L'appareil n'est pas allumé	Vérifiez que le tiroir-pile est fermé
	Le fil écouteur est cassé	Contactez votre audioprothésiste
	La pile ne fonctionne pas	Insérez une nouvelle pile dans le tiroir-pile de l'appareil
	Le pare-cérumen NanoCare est obstrué	Remplacez le pare-cérumen
Le volume de l'appareil n'est pas assez puissant	Le pare-cérumen NanoCare est obstrué	Remplacez le pare-cérumen
	Votre oreille est obstruée par du cérumen	Contactez votre médecin généraliste ou votre ORL
	Votre audition/vos acouphènes ont peut-être changé	Contactez votre audioprothésiste

Problème	Cause potentielle	Solution
L'appareil siffle constamment	Votre oreille est obstruée par du cérumen	Contactez votre médecin généraliste ou votre ORL
	Le dôme n'est pas correctement positionné dans votre conduit auditif	Sortez le dôme du conduit auditif et réinsérez-le
	L'adaptation du dôme est trop lâche	Contactez votre audioprothésiste
	L'écouteur n'est pas bien enfoncé dans le dôme	Remplacez le dôme. Si le problème persiste, contactez votre audioprothésiste
Vos deux appareils ne sont pas synchronisés	La connexion entre les appareils est interrompue	Éteignez puis allumez de nouveau les appareils
Les appareils ne répondent pas au changement de volume ou de programme demandé par la RC-DEX	<ul style="list-style-type: none"> a. La RC-DEX est utilisée au-delà de la portée de transmission (> 1m) b. Forte interférence électromagnétique à proximité c. La RC-DEX et les appareils ne sont pas appairés 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapprochez la RC-DEX des appareils b. Éloignez-le de sources d'interférences EM connues c. Vérifiez avec votre distributeur que la RC-DEX est appairée aux appareils

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOS APPAREILS ?

Vos appareils auditifs sont des objets précieux et doivent être manipulés avec soin. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour prolonger la durée de vie de vos appareils :



MISE EN GARDE

- Éteignez votre appareil lorsque vous ne vous en servez pas. Si vous ne devez pas vous en servir pendant plusieurs jours, ôtez même la pile.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, rangez-le dans un endroit sec, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes ou à une forte humidité. Essuyez soigneusement et minutieusement l'appareil après avoir transpiré lors d'une activité physique intense, par exemple après avoir fait du sport.
- Ne faites pas tomber votre appareil. Lorsque vous le nettoyez ou que vous changez la pile, placez-vous au-dessus d'une surface souple.
- Ne portez pas votre appareil sous la douche ou lorsque vous nagez, ou encore lorsque vous utilisez un sèche-cheveux, mettez du parfum, de la laque et tout autre produit que l'on vaporise. Ne le portez pas non plus lorsque vous vous mettez des crèmes comme des écrans solaires ou des lotions.

AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT

Les appareils auditifs et les piles peuvent être dangereux s'ils sont avalés ou mal utilisés. Une ingestion ou une utilisation inadéquate peut entraîner de graves lésions ou même être mortelle. En cas d'ingestion, consultez immédiatement votre médecin.

- Veuillez à garder les appareils et leurs composants, ainsi que leurs accessoires et les piles hors de portée des enfants et de toute personne susceptible d'avaler de tels objets ou de se blesser. Ne changez pas les piles en leur présence et ne leur montrez pas l'endroit où vous les rangez. Rapportez scrupuleusement les piles usées à votre audioprothésiste.
- Les piles sont très petites et peuvent facilement être prises pour des pilules ou semblables. Ne mettez jamais une pile ou un appareil dans votre bouche, étant donné qu'ils peuvent facilement être avalés.
- Il y a risque d'explosion si la pile est remplacée par un type de pile incorrect ou si vous essayez de la recharger. Ne mettez vos piles que dans des centres de recyclage ou rapportez-les à votre audioprothésiste conformément à la réglementation.
- Ne permettez jamais à une autre personne de porter votre appareil.
- L'appareil est en matière moderne anallergique. Cependant, dans de rares cas, son contact peut provoquer une irritation cutanée. Si vous constatez une irritation cutanée à l'intérieur ou autour de votre conduit auditif, veuillez contacter votre audioprothésiste.



AVERTISSEMENT

- Nous vous informons que l'utilisation de tout type d'appareils destiné à soulager les acouphènes peut impliquer un léger risque d'infection du conduit auditif. Une infection peut se produire suite à une aération inadéquate de l'oreille. Par conséquent, nous vous recommandons de retirer l'appareil et le système de maintien auriculaire de votre oreille pendant la nuit, afin que le conduit auditif puisse être aéré. Veillez à bien nettoyer et bien examiner votre appareil et le système de maintien auriculaire. En cas d'infection, veuillez consulter un médecin et contacter votre audioprothésiste qui vous conseillera sur la façon de désinfecter les divers composants de l'appareil. N'utilisez en aucun cas de l'alcool, du chlore ou d'autres solvants.
- L'utilisation régulière d'un déshumidificateur est fortement recommandée, afin d'éviter tout dysfonctionnement de l'aide auditive.
- N'utilisez pas les appareils Widex destinés à soulager les acouphènes dans des mines ou d'autres lieux contenant des gaz explosifs.
- **Ne portez pas votre appareil lors d'une radiothérapie, d'une radiographie, d'une IRM, d'un scanner ou de tout autre traitement médical et par rayon.** Les émissions de ces traitements tout comme celles provenant d'autres types de rayonnements, comme celles d'un four à micro-onde, peuvent endommager votre appareil. Les rayonnements provenant par exemple des équipements des salles de surveillance, des alarmes antivols et des téléphones portables sont plus faibles et n'endommageront pas l'appareil, mais ils peuvent créer des interférences audibles.



MISE EN GARDE

- Votre appareil a été testé pour les interférences conformément aux normes internationales. Néanmoins, il est possible qu'une interférence imprévue puisse se produire dans l'appareil en raison d'un rayonnement électromagnétique provenant d'autres produits tels que les systèmes d'alarme, les équipements de salles de surveillance et les téléphones portables.
- Bien que votre appareil ait été conçu conformément aux standards internationaux de compatibilité électromagnétique les plus stricts, la possibilité d'interférence avec d'autres équipements, tels que les appareils médicaux, n'est pas exclue.
- Ne tentez jamais d'ouvrir ou de réparer vous-même l'appareil.

CONSEILS

REMARQUE

- Le port d'appareils accroît le risque d'amas de cérumen. Veuillez contacter votre médecin / ORL si vous pensez qu'un bouchon de cérumen s'est formé dans votre oreille. Non seulement le cérumen peut diminuer votre audition, mais également réduire considérablement l'effet de l'appareil. Nous vous conseillons de vous faire nettoyer les oreilles par votre médecin deux fois par an.

REGULATORY INFORMATION

FCC ID: TTY-C4PA

IC: 5676B-C4PA

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

**Industry Canada Statement /
Déclaration d'industrie Canada**

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE 0459

Hereby, Widex A/S declares that this C2-PA is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité sur : <http://www.widex.com>

 **N26346**



Vous ne devez pas jeter les appareils auditifs, les accessoires et les piles dans les ordures ménagères ordinaires. Veuillez contacter votre audioprothésiste qui vous conseillera sur la façon de vous débarrasser, comme il se doit, de ces objets.



CE 0459

Fabricant

WIDEX A/S • Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø
Denmark • www.widex.com



Printed by HTO / 2012-10
9 514 0236 003 #01