

DEX™

UN MONDE SANS FIL

MODE D'EMPLOI
RC-DEX

Radiocommande pour les solutions Widex
destinées à soulager les acouphènes

WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

LES SYMBOLES

Dans ce mode d'emploi, vous trouverez les symboles suivants :



AVERTISSEMENT

Les messages commençant par cet intitulé indiquent des réactions indésirables, des risques potentiels de danger et une performance inadéquate de l'appareil.



MISE EN GARDE

Les messages commençant par cet intitulé vous informent sur une précaution toute particulière à prendre.



 Ne pas jeter avec les ordures ménagères ordinaires.

SOMMAIRE

LES SYMBOLES	2
VOTRE NOUVELLE RADIOCOMMANDE DEX™	4
Usage auquel cet appareil est destiné	4
Description de l'appareil	5
Vue frontale	5
Vue arrière	6
ACCESSOIRES	7
LA PILE	8
Comment changer la pile ?	9
COMMENT UTILISER LA RADIOCOMMANDE ?	11
La portée de fonctionnement	11
Le voyant lumineux	11
Le réglage du volume	11
Comment couper le son des appareils destinés à soulager les acouphènes ?	12
Comment changer de programme ?	12
COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE RADIOCOMMANDE ?	13
AVERTISSEMENTS	15
EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT	17
REGULATORY INFORMATION	19

VOTRE NOUVELLE RADIOCOMMANDE DEX™

Nous espérons que votre radiocommande Widex vous donnera entière satisfaction. Ce mode d'emploi vous explique comment la faire fonctionner.



AVERTISSEMENT

Ce livret contient des informations et des instructions importantes. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser votre radiocommande.

Usage auquel cet appareil est destiné

Cette radiocommande est destinée à faire fonctionner les solutions Widex destinées à soulager les acouphènes.


Description de l'appareil

Votre solution Widex destinée à soulager les acouphènes utilise une technologie brevetée sans fil, le WidexLink, qui permet aux appareils droit et gauche de communiquer entre eux et avec la RC-DEX.

La radiocommande RC-DEX permet d'accéder facilement aux fonctionnalités comme le réglage du volume ou le changement de programme. Elle possède également un voyant lumineux pour une indication visuelle.


Vue frontale

1. Voyant lumineux
2. Hausse du volume
3. Changement de programme
4. Baisse du volume

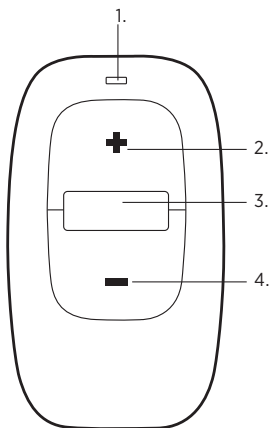



Vue arrière

1. Couvercle du logement de la pile
2. Œillet pour porte-clés/fixation de cordon

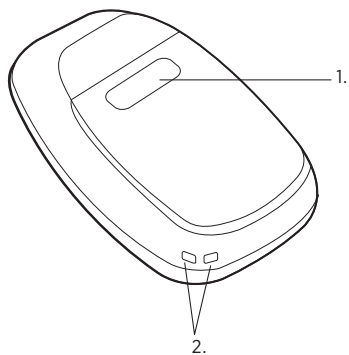

ACCESSOIRES

1. Pile
2. Anneau/cordon de porte-clés

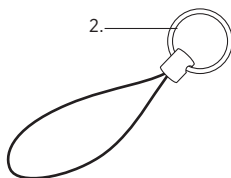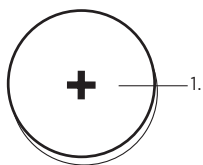

LA PILE


Cette radiocommande est alimentée par une pile **Lithium CR2032**.

Si vous souhaitez des piles de remplacement, veuillez contacter votre audioprothésiste. Veuillez noter la date limite d'utilisation et bien lire les recommandations concernant la mise au rebut des piles usagées sur l'emballage.

La radiocommande s'allume lorsqu'une pile en état de fonctionner est correctement placée dans le logement. La durée de vie de la pile est d'environ 12 mois selon l'utilisation de la radiocommande.

Comment changer la pile ?



1. Ôter le couvercle du logement de la pile en le faisant glisser vers le bas.
2. Appuyez sur la pile comme sur l'illustration de façon à la faire basculer pour la retirer du logement. Vous pouvez également retourner l'appareil et laisser la pile tomber dans votre main.

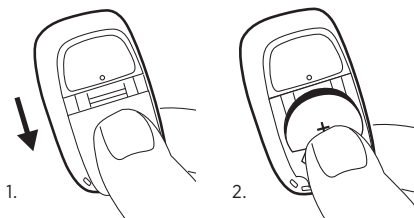

REMARQUE

Lorsque vous remplacez la pile, nous vous conseillons de placer la radiocommande au-dessus d'une surface souple.

3. Insérez la nouvelle pile en l'inclinant légèrement comme sur l'illustration, puis enfoncez-la dans le logement. Le signe plus (+) de la pile doit être orienté vers le haut.
4. Remplacez le couvercle du logement de la pile.

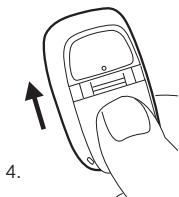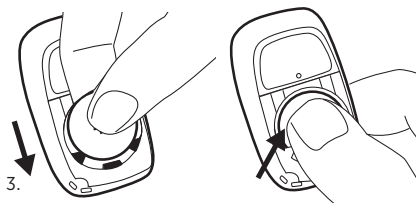

COMMENT UTILISER LA RADIOCOMMANDE ?

La radiocommande possède un œillet de fixation pour porte-clés ou objet semblable.

La portée de fonctionnement

La portée de fonctionnement de la radiocommande aux appareils destinés à soulager les acouphènes est de 1 mètre au maximum.

Le voyant lumineux

Un voyant lumineux vert indique qu'une des touches de la radiocommande a été activée.

Le réglage du volume

Appuyez brièvement sur la touche d'augmentation du volume (+) pour monter le volume. Appuyez brièvement sur la touche de diminution du volume (-) pour baisser le volume.

Lorsque vous activerez les touches de volume, vous entendrez un signal sonore bref. Lorsque le niveau de réglage minimum ou maximum est atteint, vous entendrez un signal sonore long.

Comment couper le son des appareils destinés à soulager les acouphènes ?

Sur la radiocommande, enfoncez la touche de réglage du volume vers le bas. Relâchez la touche quand le long bip sonore cessera. Une brève pression des touches de réglage de l'intensité du volume réinitialisera le son.

Comment changer de programme ?

La touche de sélection des programmes de la radiocommande vous permet de passer d'un programme à un autre.

Lorsque vous allumerez vos appareils, ils seront réglés sur le programme de démarrage. Depuis ce programme, vous pouvez accéder au programme Zen en appuyant longuement (plus d'une seconde) sur la touche. De brèves pressions de la touche de sélection des programmes vous permettront ensuite de choisir un programme Zen parmi ceux qui sont disponibles.

Pour revenir au programme de démarrage, appuyez longuement (plus d'une seconde) sur la touche.

Programme de démarrage

Zen A Bips

Zen B Tonalités et bruit

Zen C Bruit

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE RADIOCOMMANDE ?

La radiocommande est un objet précieux qui doit être manipulée avec soin. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils qui vous permettront d'en prolonger la durée de vie :



AVERTISSEMENT

- N'exposez pas la radiocommande à des températures extrêmes ou à une forte humidité.
- Ne la plongez pas dans de l'eau.



MISE EN GARDE

- Nettoyez la radiocommande avec un petit chiffon doux. Ne lavez jamais votre radiocommande avec de l'eau, des produits de nettoyage ou autres solvants.
- Évitez de laisser tomber la radiocommande.



MISE EN GARDE

- Il n'est pas recommandé de mettre votre téléphone portable/PDA à proximité de la radiocommande (par exemple dans la même poche de vêtement).
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre radiocommande vous-même. (Cela doit être effectué par du personnel habilité uniquement).



AVERTISSEMENT

Ne portez pas votre radiocommande sur vous lors d'une radiographie, d'une IRM ou de traitements par rayonnements, et ne placez jamais votre radiocommande dans un four à micro-ondes. Ces types de rayonnements sont des rayonnements qui peuvent endommager votre radiocommande. Les rayonnements du matériel de salles de surveillance, des alarmes antivol, des téléphones portables et sources semblables sont plus faibles et n'endommageront pas votre radiocommande. Cependant, de temps à autre, le rayonnement d'appareils comme certaines alarmes antivol, les détecteurs de mouvements automatiques et d'autres appareils électroniques peuvent causer des interférences audibles sensibles pendant l'utilisation de la radiocommande et d'un appareil destiné à soulager les acouphènes.

AVERTISSEMENTS



AVERTISSEMENT

L'ingestion ou l'utilisation inadéquate d'une pile peut être dangereuse. Ne mettez jamais une pile ou un appareil destinés à soulager les acouphènes dans votre bouche, étant donné qu'ils peuvent facilement être avalés. Une ingestion ou une utilisation inadéquate peut entraîner de graves lésions ou même être mortelle. En cas d'ingestion, consultez immédiatement votre médecin.

- Veillez à garder votre radiocommande ainsi que ses accessoires et les piles hors de portée des enfants et de toute personne susceptible d'avalier de tels objets ou de se blesser. Ne changez pas les piles en leur présence et ne leur montrez pas l'endroit où vous les rangez. Rapportez scrupuleusement les piles usées à votre audioprothésiste.
- N'utilisez pas votre radiocommande à bord d'un avion ou dans les hôpitaux sans autorisation préalable.
- N'utilisez pas votre radiocommande dans des mines ou d'autres lieux contenant des gaz explosifs.
- Il y a risque d'explosion si la pile est remplacée par un type de pile incorrect ou si vous essayez de la recharger.



MISE EN GARDE

(Risques) L'utilisation des appareils destinés à soulager les acouphènes/DEX ne devrait pas interférer avec des appareils tels que le pacemaker. Cependant, pour être prudent, Widex se conforme aux directives que recommandent les fabricants de défibrillateurs et pacemakers implantables à leurs patients lorsque ces derniers utilisent des téléphones portables. Les personnes qui portent des appareils destinés à soulager les acouphènes et également un pacemaker doivent

- veiller à ce que les appareils destinés à soulager les acouphènes (et/ou tout accessoire DEX) soit à une distance d'au moins 15 cm du pacemaker et
- ne pas porter les appareils destinés à soulager les acouphènes (et/ou tout accessoire DEX) dans la poche d'une chemise ou près de leur poitrine.
- En cas d'interférence, n'utilisez pas les appareils destinés à soulager les acouphènes (et/ou DEX) et contactez immédiatement le fabricant de votre pacemaker et votre audioprothésiste.
- Bien que votre radiocommande ait été conçue conformément aux standards internationaux de compatibilité électromagnétique les plus stricts, la possibilité d'interférence avec d'autres équipements, tels que les appareils médicaux, n'est pas exclue.

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT

Ces pages vous apportent quelques conseils rapides dans le cas où votre radiocommande ne fonctionnerait pas ou fonctionnerait de façon insatisfaisante. Si les problèmes persistent, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Problème	Cause possible	Solution
Votre radio-commande ne fonctionne pas	La pile est épuisée ou ne fonctionne pas	Remplacer la pile
	La pile de votre appareil pour soulager les acouphènes est épuisée	Remplacer la pile
	Hors de la portée de fonctionnement (< 1m)	Le déplacer au sein de la portée de fonctionnement
	Forte interférence électromagnétique	Éloignez-le de la source d'interférence
	La RC-DEX et les appareils pour soulager les acouphènes ne sont pas appairés	Contactez votre audioprothésiste

Problème	Cause possible	Solution
Les appareils ne répondent pas au changement de volume ou de programme demandé par la RC-DEX	<ul style="list-style-type: none"> a. La RC-DEX est utilisée au-delà de la portée de transmission b. Forte interférence électromagnétique à proximité c. La RC-DEX et les appareils destinés à soulager les acouphènes ne sont pas appairés 	<ul style="list-style-type: none"> a. Rapprochez la RC-DEX des appareils pour soulager les acouphènes b. Éloignez-la de sources d'interférences EM connues c. Vérifiez avec votre distributeur que la RC-DEX est appairée aux appareils pour soulager les acouphènes

REGULATORY INFORMATION

FCC ID: TTY-RCDEX

IC: 5676B-RCDEX

Federal Communications Commission Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.

Industry Canada Statement / Déclaration d'industrie Canada

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada.

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CE 0459

Par la présente Widex A/S déclare que cette RC-DEX est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité sur : <http://www.widex.com>.

 **N26346**



Vous ne devez pas jeter les appareils destinés à soulager les acouphènes, les accessoires et les piles dans les ordures ménagères ordinaires. Veuillez contacter votre audioprothésiste qui vous conseillera sur la façon de vous débarrasser, comme il se doit, de ces objets.



CE 0459

Fabricant
WIDEX A/S • Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø
Denmark • www.widex.com



Printed by HTO / 2012-10
9 514 0237 003 #01