

WIDEX **UNIQUE**[™]

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СЕРИЯ WIDEX UNIQUE

U-CIC/U-CIC TR/U-CIC-M/U-CIC-M TR
Внутриканальный слуховой аппарат



WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

ВАШ СЛУХОВОЙ АППАРАТ WIDEX®

(Заполняется специалистом по слухопротезированию)

Вент: Короткий Полной длины Нет

CIC CIC-M

Серия вашего слухового аппарата

ПРОГРАММЫ

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Универсальная | <input type="checkbox"/> Расширитель Диапазона Слышимости |
| <input type="checkbox"/> Тишина | <input type="checkbox"/> Расширитель Диапазона Слышимости |
| <input type="checkbox"/> Транспорт | <input type="checkbox"/> Расширитель Диапазона Слышимости |
| <input type="checkbox"/> Город | <input type="checkbox"/> Расширитель Диапазона Слышимости |
| <input type="checkbox"/> Вечеринка | <input type="checkbox"/> Расширитель Диапазона Слышимости |
| <input type="checkbox"/> Музыка | <input type="checkbox"/> Расширитель Диапазона Слышимости |
-

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Zen

Расширитель Диапазона Слышимости

Телефон

Расширитель Диапазона Слышимости

ПРОГРАММЫ SMARTTOGGLE

Zen+

Расширитель Диапазона Слышимости

ПРИМЕЧАНИЕ

В таблице приведены названия программ по умолчанию. Если вы хотите использовать другие названия, впишите новые названия в таблицу. Так вы всегда будете знать, какие программы установлены в ваших слуховых аппаратах.

ПРИМЕЧАНИЕ

СIC-M не является беспроводным слуховым аппаратом, а значит эта модель не может устанавливать связь с другим аппаратом или аксессуарами. Вы не можете регулировать звук, и у вас будет только одна программа прослушивания.

СОДЕРЖАНИЕ

ВАШ СЛУХОВОЙ АППАРАТ WIDEX.....	6
Познакомьтесь с Widex.....	6
Описание слухового аппарата.....	7
Важные сведения по технике безопасности.....	8
СЛУХОВОЙ АППАРАТ.....	10
Показания к применению.....	10
Назначение.....	10
Батарея.....	10
Индикация низкого заряда батареи.....	11
Замена батарейки.....	11
Звуковые сигналы.....	12
Потеря пары.....	13
Как отличить правый аппарат от левого.....	13
Включение и выключение слухового аппарата.....	14
Установка и снятие слухового аппарата.....	15
Как снять слуховой аппарат.....	15
Регулировка звука.....	16
Программы.....	17
Смена программ.....	18
Программа Zen.....	19

ОЧИСТКА.....	20
Инструменты.....	20
Очистка слухового аппарата.....	20
Защита от серы.....	23
АКСЕССУАРЫ.....	26
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.....	27
НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	30
Директивы ЕС.....	30
Директива 1999/5/ЕС.....	30
Информация об утилизации.....	30
Регистрация FCC и IC.....	30
СИМВОЛЫ.....	34

ВАШ СЛУХОВОЙ АППАРАТ WIDEX

Познакомьтесь с Widex


Поздравляем с приобретением слухового аппарата.

Используйте ваш слуховой аппарат регулярно, даже если вам потребуется время, чтобы к нему привыкнуть. Нерегулярное использование означает, что пользователь не сможет получить всех преимуществ от слухового аппарата.


ПРИМЕЧАНИЕ

Ваш слуховой аппарат и аксессуары могут отличаться от рисунков, приведенных в данной инструкции. Мы также оставляем за собой право вносить необходимые изменения.

Описание слухового аппарата

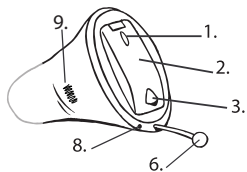

1. Входы микрофона
2. Крышка батарейного отсека (функция вкл./выкл.)
3. Зацеп для ногтя
4. Звуковод
5. Серная защита Widex
6. Леска для удаления
7. Вентиляционное отверстие (короткое)
8. Вентиляционное отверстие (полной длины)

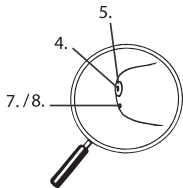

Важные сведения по технике безопасности

Внимательно прочитайте эту инструкцию, прежде чем начать использовать слуховой аппарат.



Слуховые аппараты и батарейки представляют опасность в случае проглатывания или ненадлежащего использования. Проглатывание или ненадлежащее использование может привести к серьезным травмам или даже смерти. В случае проглатывания обратитесь немедленно врачу.



Всегда снимайте слуховые аппараты, когда не пользуетесь ими. Таким образом вы проветрите слуховой проход и предотвратите инфекции уха.



Обратитесь к врачу или слухопротезисту, если вы подозреваете инфекцию в ухе.



Снимайте слуховой аппарат, когда идете в душ, бассейн или пользуетесь феном.



Не надевайте слуховые аппараты, когда используете туалетную воду, спрей для тела, гели, лосьон или крем.



Не сушите слуховой аппарат в микроволновой печи, это выведет его из строя.



Никогда не используйте слуховые аппараты других людей и не разрешайте другим людям носить ваши слуховые аппараты, так как это может повредить слух.



Никогда не используйте слуховые аппараты в местах, где есть взрывоопасные газы, например в шахте.



Храните слуховые аппараты, их части, аксессуары и батарейки вдали от детей.



Никогда не пытайтесь открыть или отремонтировать слуховой аппарат самостоятельно. Обратитесь к своему специалисту, если вам необходимо отремонтировать слуховой аппарат.



Ваши слуховые аппараты содержат технологию радиосвязи. Всегда обращайте внимание на обстановку, в которой вы их используете. Если есть какие-то ограничения, всегда следуйте предписаниям.



Не подвергайте слуховые аппараты воздействию высокой температуры или влажности. Обязательно просушите слуховой аппарат, если они намокли или вы сильно вспотели.

Слуховые аппараты должны храниться и транспортироваться в пределах следующих температур и влажности -20°C до $+55^{\circ}\text{C}$ (-4°F до 131°F) и 10%-95% rH.

Хранение и транспортировка до 60°C (140°F) и 10%-95% rH может производиться в течение короткого времени (макс. 2 недели).

Ваши слуховые аппараты рассчитаны на работу при температуре от 0°C (32°F) до 50°C (122°F), при уровнях влажности 10%-95% rH и при уровнях атмосферного давления от 750 до 1060 mBar.

Чтобы получить более подробную информацию о слуховых аппаратах, посетите сайт <https://global.widex.com>.

СЛУХОВОЙ АППАРАТ

Показания к применению

Слуховые аппараты показаны лицам старше 36 месяцев с нарушением слуха от минимального (10 дБ НЛ) до серьезного (90 дБ НЛ) при любых видах тугоухости.

Их программирование должны осуществлять дипломированные специалисты по нарушениям слуха (аудиологи, сурдологи, специалисты по слухопротезированию, отоларингологи), прошедшие обучение по реабилитации слуха.

Назначение

Слуховые аппараты являются воздухопроводящими усилительными устройствами, предназначенными для использования в повседневной акустической среде. Слуховые аппараты могут быть снабжены программой «Дзен», предназначенной для фонового воспроизведения расслабляющих звуков (т. е. музыки / белого шума) для взрослых, желающих послушать подобные фоновые звуки в спокойной обстановке.

Батарея

В вашем **слуховом аппарате** используется воздушно-цинковая батарея типа 10.

Всегда используйте новые батареи именно того типа, который рекомендован вам аудиологом.

ПРИМЕЧАНИЕ

Прежде чем вставить батарею в слуховой аппарат, убедитесь, что она совершенно чистая, без каких-либо следов клея или других веществ. В противном случае слуховой аппарат может функционировать не так, как должен.



Ни в коем случае не пытайтесь подзарядить батареи своего слухового аппарата: это может привести к их взрыву.



Ни в коем случае не оставляйте разряженную батарею в слуховом аппарате, убирая его на хранение. Она может протечь и необратимо повредить слуховой аппарат.



Утилизируйте использованные батареи согласно инструкции на упаковке. Следите за сроком годности батарей.

Индикация низкого заряда батареи

Когда батарея разрядится, может прозвучать звуковой сигнал. Однако, если батарея разрядится внезапно, этого может не произойти. Мы рекомендуем всегда иметь при себе запасную батарею, куда бы вы ни пошли.

Замена батареек

Чтобы заменить батарейку, сделайте следующее:



Снимите защитную пленку с батарейки и убедитесь, что на ней не осталось следов клея. Оставьте ее «подышать» на 60 секунд.



С помощью зацепа для ногтя аккуратно откройте батарейный отсек и достаньте старую батарейку.



Теперь расположите батарейку в батарейном отсеке так, как показано на рисунке. Закройте батарейный отсек. Если батарейка вставлена правильно, то батарейный отсек закрывается без усилий.

Если вы не будете использовать слуховой аппарат несколько дней, достаньте из него батарейку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы не уронить слуховой аппарат, при замене батарейки держите его над мягкой поверхностью.

Звуковые сигналы

Слуховой аппарат воспроизводит звуковые сигналы, сообщающие о включении определенных функций или смене программ. Эти сигналы могут быть как речевыми сообщениями, так и тональными, в зависимости от ваших потребностей и предпочтений.

Программа 1 Сообщение / короткий гудок

Программа 2 Сообщение / два коротких гудка

Программа 3 Сообщение / три коротких гудка

Программа 4 Сообщение / один короткий и один длинный гудок

Программа 5 Сообщение / один длинный гудок и два коротких

Дзен+ Сообщение/тон

Если эти сигналы вам не нужны, попросите своего аудиолога отключить их.

Потеря пары

(Доступно только для беспроводных аппаратов серии 440)

Ваш аудиолог может включить функцию, обеспечивающую подачу сигнала слуховым аппаратом, если он теряет контакт со слуховым аппаратом для другого уха. Вы услышите речевое сообщение.

Как отличить правый аппарат от левого

Слуховой аппарат для правого уха помечен красной меткой. Слуховой аппарат для левого уха помечен синей меткой.

Включение и выключение слухового аппарата



Чтобы включить слуховой аппарат, закройте крышку батарейного отсека и надавите на нее вверх. При включении слухового аппарата вы услышите звуковой сигнал, если ваш специалист не отключил эту функцию.



Чтобы выключить слуховой аппарат, надавите на крышку батарейного отсека вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ

Вы также можете взять слуховой аппарат в руку, чтобы проверить, включен ли он. Если он включен, то он начнет свистеть. Не забывайте выключать слуховой аппарат, когда не пользуетесь им.

Установка и снятие слухового аппарата



Закройте крышку батарейного отсека полностью. Возьмите слуховой аппарат большим и указательным пальцами и аккуратно вставьте его в ухо, пока не почувствуете сопротивление.


Кончиком указательного пальца продвиньте слуховой аппарат в ухо, пока он удобно не расположится в ухе.

Чтобы было легче расположить слуховой аппарат в ухе, другой рукой вы можете оттянуть наружное ухо назад и вверх.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если ушной вкладыш сидит неудобно, вызывает дискомфорт, раздражение или покраснение кожи, обратитесь к своему специалисту.

Как снять слуховой аппарат

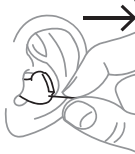

Используйте леску для удаления, чтобы вытащить слуховой аппарат из уха.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вытащить слуховой аппарат получается с трудом, аккуратно подвигайте его из стороны в сторону, при этом продолжая тянуть за леску.

Регулировка звука

Ваш слуховой аппарат регулирует звук автоматически в зависимости от звуковой обстановки.

Если у вас имеется пульт дистанционного управления (ПДУ), вы можете регулировать звук вручную, чтобы добиться ощущения комфорта или лучшей слышимости, в зависимости от необходимости и ваших личных предпочтений. Более подробные сведения о регулировке звука вы можете получить у своего аудиолога.

В зависимости от настроек и функций слухового аппарата любые настройки звука могут повлиять на оба слуховых аппарата.

Всякий раз, когда вы используете регулятор громкости, будет раздаваться гудок, если только ваш аудиолог не отключит эту функцию. При достижении максимального или минимального значения послышится непрерывный гудок.

Чтобы отключить звук слухового аппарата, проделайте следующее:

- Нажимайте нижнюю часть клавиши регулятора громкости на ПДУ, пока не услышите непрерывный гудок.

Чтобы включить звук снова:

- Нажмите верхнюю часть клавиши регулятора громкости **или**
- смените программу.

Любые изменения громкости отменяются, когда вы отключаете слуховой аппарат или меняете программу.

Программы

ПРОГРАММА	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Универсальная	Для ежедневного использования
Тишина	Специальная программа для использования в тихой обстановке
Транспорт	Для использования в ситуациях, где присутствует шум машин, поездов и т.д.
Город	Для использования в ситуациях с изменяющимся уровнем звука (в магазине, шумных местах)
Вечеринка	Для использования в ситуациях, где несколько людей говорят одновременно
Музыка	Для прослушивания музыки
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Zen	Проигрывает тоны или шум для создания спокойного звукового фона
Телефон	Эта программа создана для разговора по телефону
Zen+	Эта программа похожа на Zen, но позволяет слушать различные типы тонов или шум

ПРИМЕЧАНИЕ

Названия программ в списке - это названия по умолчанию. Ваш специалист может также выбрать название программы из предварительного списка. Тогда вам будет легче выбрать правильную программу для акустической ситуации.

В зависимости от вашего нарушения слуха, ваш специалист может активировать функцию Расширителя Диапазона Слышимости. Спросите у своего специалиста, как вам может это помочь.

Если со временем ваши потребности или предпочтения изменятся, ваш специалист легко сможет изменить выбор программ.

Смена программ

Чтобы сменить программу, просто нажмите клавишу переключения программ на ПДУ.

Дзен+

Чтобы получить доступ к этой программе, нажмите и удерживайте клавишу переключения программ не менее одной секунды. После этого короткое нажатие клавиши позволяет циклически менять доступные стили «Дзен». Чтобы выйти из этой программы, снова нажмите и удерживайте клавишу переключения программ не менее одной секунды.

Программа Zen

В Ваш слуховой аппарат может быть установлена программа проигрывания музыкальных тонов Zen. Она проигрывает музыкальные тоны (иногда шум) на заднем фоне.



Если Вы чувствуете, что стали хуже слышать звуки, речь потеряла четкость, шум в ушах усилился, обратитесь к специалисту по слухопротезированию.




Использование программы Zen может повлиять на восприятие повседневных звуков, в том числе речи. Ей не следует пользоваться в ситуациях, где эти звуки очень важны. Для этих ситуаций выбирайте другую программу.

ОЧИСТКА

Инструменты

Для чистки слухового аппарата у вас будут следующие инструменты:

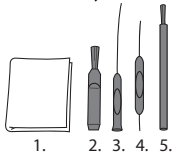

1. Салфетка
2. Щеточка
3. Длинный инструмент для удаления серы
4. Короткий инструмент для удаления серы
5. Батарейный магнит

Очистка слухового аппарата

Правильный ежедневный уход за слуховым аппаратом продлит срок его службы и сделает его использование более комфортным.

Слуховой аппарат



Протрите слуховой аппарат салфеткой (например, той, которую вы получили вместе со слуховым аппаратом).

Звуковод



Уберите видимую серу **вокруг** звукового отверстия с помощью щеточки или салфетки. **Никогда** не пытайтесь очистить серную защиту.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если не получается прочистить звуковод полностью, обратитесь к специалисту. **Никогда** ничего не вставляйте в звуковод, так как это может повредить слуховой аппарат.

Входы микрофонов




Откройте крышку батарейного отсека и поверните слуховой аппарат так, чтобы открытый батарейный отсек смотрел вниз (см. рисунок). Проденьте короткий инструмент для удаления серы (номер 4) через входы микрофонов на батарейном отсеке с внутренней стороны (см. рисунок).

ПРИМЕЧАНИЕ

Если вам кажется, что сера или грязь попали через вход микрофона в сам слуховой аппарат, обратитесь к специалисту. Ничего **не** вставляйте в сам микрофон.

Вентиляционное отверстие

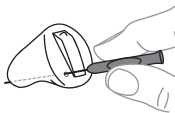

Короткий вент: очистите вент от серы с помощью длинного конца инструмента для удаления серы (номер 3) до упора.

Длинный вент: очищайте вент каждый день с помощью длинного инструмента для удаления серы (номер 3), продевая его через все вентиляционное отверстие.

Оставляйте слуховой аппарат открытым, чтобы он проветривался.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для адекватной работы слухового аппарата очень важно, чтобы вентиляционное отверстие было чистым от серы, пыли и т.п. Прочищайте его каждый день после использования и в случае засора обращайтесь к специалисту.

Просушите слуховой аппарат, если он промок или если вы сильно вспотели. Некоторые используют для этого специальные сушики, например, Widex Dry-Go, чтобы просушить и очистить слуховой аппарат. Спросите у своего специалиста, может ли это помочь вам.



Не используйте воду или чистящие средства для чистки слухового аппарата.




Очищайте и осматривайте слуховой аппарат каждый день после использования, чтобы убедиться в его исправности. Если слуховой аппарат сломается в ухе и его части останутся внутри слухового прохода, обратитесь к врачу. Не пытайтесь достать части самостоятельно.

Защита от серы

Защита от серы Widex помогает защитить слуховой аппарат от ушной серы. Всегда используйте защиту от серы Widex для вашего слухового аппарата. В противном случае гарантия на слуховой аппарат действовать не будет.


Замена защиты от серы

Откройте футляр с серной защитой, как показано на рисунке.

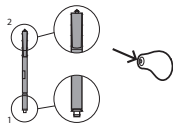


Защита от серы состоит из следующих частей:


1. Крюк для удаления
2. Новая защита от серы

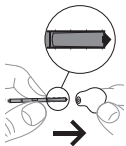



Вставьте крюк для удаления в использованную серную защиту.

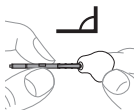


Поверните держатель под нужным углом.

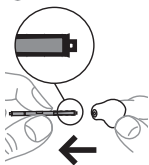

Вытащите использованную защиту.

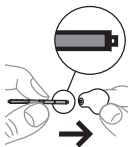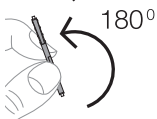

Вставьте новую защиту в звуковое отверстие и аккуратно вдавите защиту.

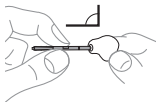

Вытащите держатель.



Спросите у своего специалиста, как часто следует менять защиту от серы.



Серная защита может использоваться только один раз и не подлежит очистке.



Если серная защита сидит неплотно, вам следует ее выбросить и использовать новую.



Если серная защита выпала из слухового аппарата и осталась в слуховом проходе, обратитесь к врачу или своему специалисту. НЕ пытайтесь самостоятельно достать ее.

АКСЕССУАРЫ

Для вашего слухового аппарата доступны различные вспомогательные устройства. Вы можете проконсультироваться со специалистом о преимуществах этих аксессуаров для вас.

Название	Использование
RC-DEX	пульт дистанционного управления
TV-DEX	для просмотра ТВ и слушания радио
PHONE-DEX	стационарный телефон
FM+DEX	для потоковой передачи аудио и FM сигналов
UNI-DEX	для соединения слуховых аппаратов с мобильными телефонами
CALL-DEX	для легкого беспроводного подключения к мобильным телефонам
COM-DEX	Для беспроводного соединения с мобильными телефонами и другими устройствами по bluetooth

Доступно только в некоторых странах.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже приведены рекомендации того, что следует сделать, если ваш слуховой аппарат работает неадекватно. Если эти рекомендации не помогут, обратитесь к специалисту.

Проблема	Возможная причина	Решение
Слуховой аппарат молчит	Слуховой аппарат не включен	Убедитесь, что батарейка вставлена правильно и крышка батарейного отсека плотно закрыта.
	Батарейка разрядилась	Вставьте новую батарейку в слуховой аппарат
	Звуковое отверстие заблокировано	Обратитесь к разделу Чистка
	Вход микрофона заблокирован	Обратитесь к разделу Чистка
Недостаточная громкость слухового аппарата	Звуковое отверстие заблокировано	Обратитесь к разделу Чистка
	В ухе скопилась сера	Обратитесь к врачу
	Изменилось состояние уха	Обратитесь к своему специалисту/врачу

Проблема	Возможная причина	Решение
Слуховой аппарат постоянно свистит	В ухе скопилась сера	Обратитесь к врачу
	Неправильно вставлен в слуховой проход	Достаньте слуховой аппарат из уха и вставьте его заново
	Слуховой аппарат неплотно сидит в слуховом проходе	Обратитесь к своему специалисту
Слуховой аппарат неудобно носить	Неправильно вставлен в слуховой проход.	Обратитесь к своему специалисту
	Слуховой аппарат неплотно сидит в ухе	Обратитесь к своему специалисту
	Наружное ухо или слуховой проход воспалился	Для начинающих пользователей очень важно поначалу носить слуховые аппараты не долго. На привыкание к слуховым аппаратам уходит 2-3 недели. Если раздражение не прошло, обратитесь к специалисту
Слуховые аппараты работают не синхронно	Пропала связь между слуховыми аппаратами	Выключите и включите слуховые аппараты

Проблема	Возможная причина	Решение
Слуховые аппараты не реагируют на изменения громкости или переключение программы на дополнительном устройстве	<p>а. Устройство находится вне зоны действия</p> <p>б. Рядом наблюдается сильное электромагнитное воздействие</p> <p>в. Отсутствует сопряжение между устройством и слуховыми аппаратами</p>	<p>а. Расположите устройство ближе к слуховым аппаратам</p> <p>б. Выйдите из поля электромагнитного воздействия</p> <p>в. Обратитесь к вашему специалисту, чтобы узнать, проверено ли сопряжение устройства со слуховыми аппаратами</p>
Вы слышите неровную речь через слуховые аппараты или не слышите речь от передающего слухового аппарата.	<p>а. В одном из слуховых аппаратов не работает батарейка</p> <p>б. Рядом наблюдается сильное электромагнитное воздействие</p>	<p>а. Замените батарейку в одном или обоих слуховых аппаратах</p> <p>б. Выйдите из поля электромагнитного воздействия</p>

НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Директивы ЕС

Директива 1999/5/ЕС

Настоящим Widex A/S подтверждает, что U-CIC, U-CIC TR, U-CIC-M и U-CIC-M TR отвечают основополагающим требованиям Директивы 1999/5/ЕС.

Копию Декларации о соответствии можно найти на сайте:

<http://www.widex.com/doc>



N26346

Информация об утилизации

Слуховые аппараты и аксессуары к ним нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Слуховые аппараты, батарейки и аксессуары должны утилизироваться в специальных местах, предназначенных для утилизации электронного оборудования.

Регистрация FCC и IC

FCC ID: TTY-UCIC

IC: 5676B-UCIC

Заявление Федеральной Комиссии Связи США

Данное устройство отвечает пункту 15 правил ФКС. Должны соблюдаться следующие условия:

- (1) Это устройство не должно вызывать помехи и
- (2) должно принимать любые возникающие помехи.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данное устройство было протестировано, в результате чего было установлено, что оно соответствует предельным значениям устройства класса В, согласно пункту 15 правил ФКС. Эти пределы установлены с целью предоставления адекватной защиты от вредных помех жилых помещений. Данное устройство производит, использует и может излучать радиочастоты и, если оно используется без соблюдения инструкций, может вызывать помехи в работе радиоустройств. Однако нет гарантии, что эти помехи не возникнут в конкретном помещении. Если это устройство не вызывает помех и не мешает приему теле- и радиосигналов (это можно проверить, выключив и включив устройство), пользователь может попытаться убрать помехи следующими способами:

- Менять направление принимающей антенны.
- Увеличить расстояние между устройством и ресивером.
- Подсоединить оборудование к розетке другого контура тока, отличного от того, к которому подключен ресивер.
- Обратиться к дилеру или опытному технику за помощью.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Устройство отвечает установленным ФКС предельным значениям облучения для неконтролируемой среды. Передатчик не должен работать рядом с другой антенной или другим передатчиком.

Любые изменения или модификации устройства, не одобренные Widex, лишают пользователя права использовать это устройство.

Заявление Министерства Промышленности Канады

Согласно положениям Министерства Промышленности Канады, этот радиопередатчик может работать только с использованием антенны типа и усиления, одобренного Министерством Промышленности Канады.

Чтобы уменьшить возможные радиопомехи для других пользователей, тип антенны и усиление должны быть выбраны так, чтобы эквивалентная мощность изотропного излучения не превышала уровень, необходимый для хорошего соединения.

Это устройство соответствует стандартам RSS Министерства промышленности Канады. Должны соблюдаться следующие условия:

- (1) Это устройство не должно вызывать помехи и
- (2) должно принимать любые возникающие помехи.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

СИМВОЛЫ

Обозначения, используемые компанией Widex A/S для маркировки медицинских приборов (в этикетках, руководствах по эксплуатации и т. п.)

Символ Название/Описание



Изготовитель

Изделие произведено изготовителем, чье наименование и адрес указаны рядом с символом. Если уместно, может также быть указана дата изготовления.



Номер по каталогу

Номер позиции (артикула) изделия по каталогу.



Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации содержит важную информацию по технике безопасности (предупреждения / меры предосторожности), и перед использованием изделия необходимо ознакомиться с ней.



Предупреждение

Текст, помеченный символом предупреждения, необходимо прочесть до начала эксплуатации изделия.



Маркировка WEEE

«Не выбрасывать с бытовыми отходами». По окончании использования изделия его необходимо передать в специализированный пункт сбора для утилизации и переработки во избежание опасности или причинения вреда окружающей среде или человеческому здоровью из-за присутствия вредных веществ.

Символ **Название/Описание**




Маркировка CE

Изделие отвечает требованиям, изложенным в директивах Европейского союза по маркировке CE.



Маркировка RCM

Изделие отвечает требованиям по электрической безопасности, нормативным требованиям по ЭМС и радиоспектрам для изделий, поставляемых на австралийский или новозеландский рынок.

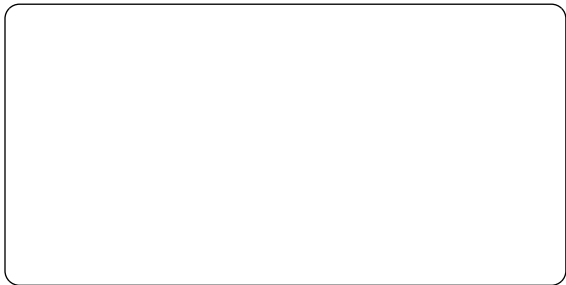

WIDEX A/S

Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø, Denmark

<https://global.widex.com>



0459

Руководство №:

9 514 0315 032 #03

Выпуск:

2019-03



9 514 0315 032 03

