

# Entretien et nettoyage des intra

# 6



**Comment entretenir et nettoyer  
les intra-profonds et intra-auriculaires**



*Cette brochure est le numéro 6 d'une série de chez Widex sur l'audition et les sujets s'y rapportant.*

**WIDEX**  
high definition hearing

# Entretien

Nous vous recommandons de manipuler votre aide auditive avec précaution. Grâce à la technologie numérique d'aujourd'hui, il est possible de fabriquer des aides auditives très petites et performantes. Cependant, pour prolonger la durée de vie de votre aide auditive et en tirer tous les bénéfices possibles, il est important de la nettoyer et de l'entretenir correctement.





Avant tout, il faut manipuler l'aide auditive avec précaution et faire attention qu'elle ne soit pas exposée à des chocs ou coups. Lors du positionnement et de l'extraction, placez-vous au-dessus d'une table au cas où l'appareil tomberait.

Lorsque vous ne portez pas l'appareil, éteignez-le, retirez la pile et gardez-le dans l'emballage d'origine. Ne laissez jamais les piles à portée de main des enfants et des animaux domestiques.



N'exposez jamais votre aide auditive à la chaleur ou à l'humidité. Aussi y a-t-il des situations où vous ne devez pas porter votre aide auditive - par exemple sous la douche, à l'exposition de rayons ou lorsque vous utilisez un sèche-cheveux ou mettez de la laque.

# Nettoyage

Ne nettoyez jamais l'aide auditive en utilisant de l'eau ou d'autres liquides. Les surfaces de l'appareil doivent être essuyées avec un chiffon doux et sec tandis que la sortie du son, l'entrée du microphone et l'évent doivent être nettoyés avec l'outil approprié.


Le cérumen est le pire ennemi de l'aide auditive. Le moindre amas de cérumen peut causer un dysfonctionnement de l'appareil. Une aide auditive positionnée dans le conduit auditif ne peut pas éviter d'être en contact avec du cérumen. Aussi est-il très important de nettoyer votre aide auditive souvent et de façon correcte.

Etant donné que le cérumen et la saleté peuvent se poser à plusieurs endroits sur l'appareil, vérifiez votre appareil à la suite de chaque extraction. Tout comme le brossage des dents, le nettoyage de l'aide auditive doit devenir une routine quotidienne.

## Sortie du son

Un amas de cérumen cause facilement le dysfonctionnement de l'appareil. S'il y a un amas de cérumen autour de la sortie du son, vous pouvez utiliser du papier essuie-tout ou le chiffon approprié pour l'enlever. Ne le faites pas avant le lendemain matin pour que le cérumen soit sec et facile à enlever.




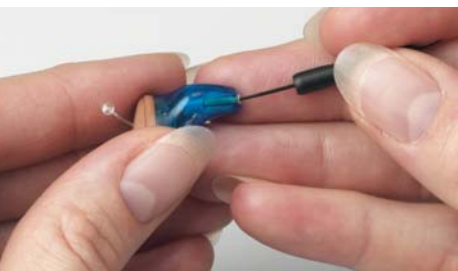

### **L'évent des intra-profonds**

Certains intra-profonds ont un évent particulier qui comprend un tube jaune sortant à côté de la sortie du son.

L'aiguille de nettoyage pour intra-profond comprend une aiguille avec une partie courte et une partie longue. Le bout de la partie longue se termine par une petite boule et est utilisée pour nettoyer l'évent. Insérez l'aiguille dans l'orifice jaune comme sur l'image. Nous vous recommandons d'ouvrir le logement de pile. Puis, orientez le logement bien ouvert vers le bas pour que le cérumen puisse être enlevé de l'appareil.

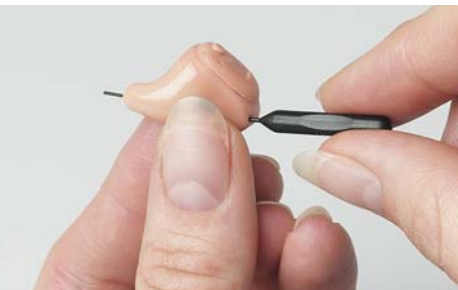

Remarque: N'introduisez jamais l'aiguille dans la sortie du son (l'orifice blanc).

### **L'évent des intra-auriculaires**

La plupart des intra-auriculaires ont un évent continu. Vous pouvez le garder propre en y passant l'aiguille comme sur l'image.



### **Entrée du microphone**

Sur les intra-profonds, utilisez la partie courte de l'aiguille de nettoyage pour retirer le cérumen qui s'est déposé autour de l'entrée du microphone dans le couvercle de logement de pile. Ouvrez le couvercle et introduisez l'aiguille dans l'orifice de l'intérieur vers l'extérieur. Faites-le chaque soir à la suite de l'extraction de l'aide auditive.

Si l'appareil intra-auriculaire est un modèle dont l'orifice du microphone est recouvert d'une petite grille, il faut le nettoyer avec la petite brosse (voir image). Si l'appareil est un modèle sans grille, nettoyez-le avec l'aiguille de nettoyage (voir image).

### **Protège-cérumen**

Le protège-cérumen est un filtre placé à l'orifice de la sortie du son. Ce filtre empêche le cérumen et la saleté de s'introduire dans l'appareil même. Si l'aide auditive est munie d'un protège-cérumen, il est important d'enlever le cérumen et la saleté qui se sont déposés autour de celui-ci. Pour ce faire, utilisez le chiffon doux ou la petite brosse.

Comme la production de cérumen est très individuelle, certains utilisateurs d'aides auditives ont besoin de changer leur protège-cérumen souvent, tandis que d'autres n'ont besoin de le faire que toutes les deux semaines. Que l'aide auditive soit munie de protège-cérumen ou pas, n'introduisez jamais rien directement dans la sortie du son.

Même si vous suivez nos conseils de nettoyage, le cérumen et la saleté arrivent parfois à se déposer dans l'appareil même ce qui peut causer le dysfonctionnement de l'appareil. Dans ce cas, consultez votre audioprothésiste.





Printed by FB / 09-02  
P 00M 0715 103