



HØR **BEGGE SIDER** AF HISTORIEN - I LÆNGERE TID




BRUGER TRE GANGE MINDRE BATTERISTRØM
END ANDRE TRÅDLØSE CROS LØSNINGER

WIDEX CROS
HEAR IT FROM BOTH SIDES



WIDEX CROS

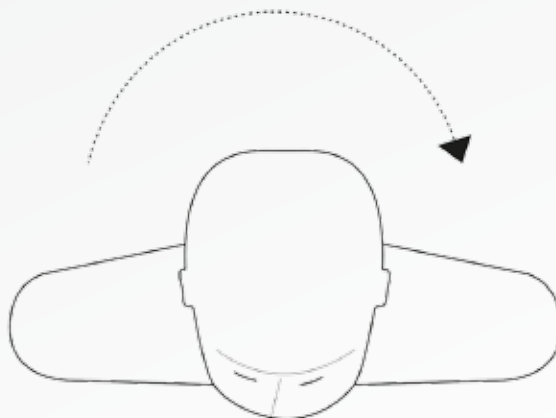

LYD TRANSMITTERES FRA
BRUGERENS DØVE ØRE TIL
ØRET MED BEDRE HØRELSE



WIDEX HØREAPPARATER

WIDEX CROS HØR DET FRA BEGGE SIDER

Mennesker med ensidig døvhed kan gå glip af mange vigtige lyde i livet, og de kan især have vanskeligt ved at høre tale.

WIDEX CROS er den ultimative løsning til dine klienter med ensidig døvhed. WIDEX CROS er nemt at bruge og tilpasse, og det kan konfigureres som enten CROS eller BiCROS løsning for at øge opmærksomheden og hørelsen.


Begge løsninger fungerer ved hjælp af den diskrete FUSION model eller FASHION model i brugerens døde øre, mens øret med bedre hørelse kan tilpasses med et Widex høreapparat – på alle funktionalitetsniveauer*.

- Nemt at bruge og vedligeholde
- Nemt at tilpasse med brugervenlig Widex software
- Ekstremt lavt batteriforbrug – bruger tre gange mindre batteristrøm end andre trådløse CROS løsninger
- Moderne og stilfuldt design
- Fantastisk lyd kvalitet
- Ideel til at høre tale
- Intet ekko, ingen forvrængning
- Kompatibel med DEX audioudstyr (når det ikke transmitterer).

Med WIDEX CROS kan brugerne høre begge sider af historien.


CROS LØSNINGEN

Døvhed (ingen eller meget ringe hørelse) på det ene øre og normal hørelse på det andet:

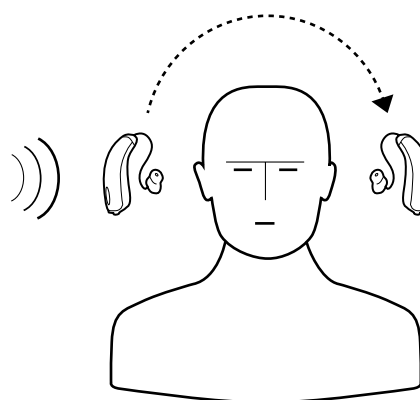

BiCROS LØSNINGEN

Døvhed (ingen eller meget ringe hørelse) på det ene øre og nedsat hørelse på det andet:

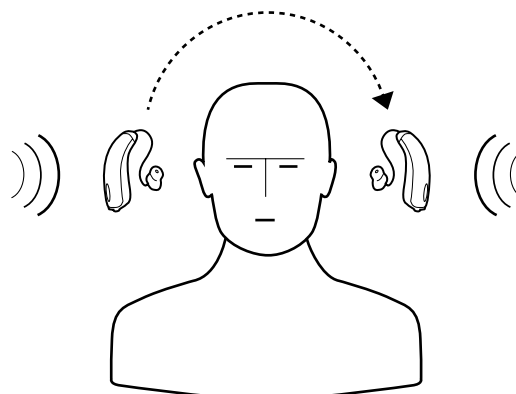


SÅDAN VIRKER CROS

WIDEX CROS bæres som et almindeligt bag-øret-høreapparat på det døde øre. Det opfanger lyd fra omgivelserne og transmitterer via WidexLink teknologi til et Widex høreapparat på det andet øre.

*Undtagen CIC MICRO.

TILPASNING AF WIDEX CROS BICROS LØSNINGEN - TRIN FOR TRIN

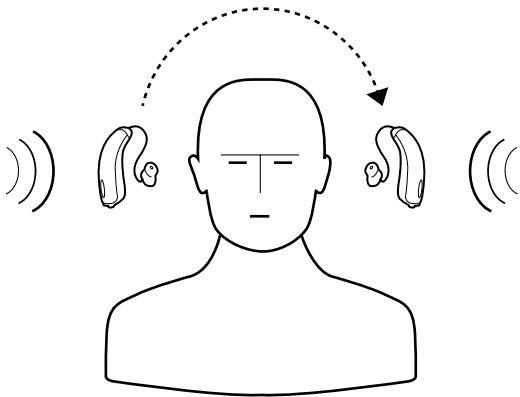

BICROS LØSNING

På basis af klientens audiogram vælges et høreapparat til øret med bedre hørelse.

Anbring høreapparatet og WIDEX CROS i patientens ører og klik **Tilslut**. Du skal være opmærksom på, at WIDEX CROS kun er aktivt i demonstrationstilstanden. Det er ikke aktivt i vinduerne Detektering og Valg.

1. Foretag en monoaural tilpasning af øret med bedre hørelse, kør feedback-testen og mål **Sensogram**.



2. For at matche høreapparatet på øret med bedre hørelse og WIDEX CROS skal du gå til **Håndtering**, vælge CROS/BiCROS og klikke på **Start matching**.



3. Når et nyt vindue åbnes, skal du klikke på **BiCROS** og definere mikrofonindstillingen – Locator eller Locator Omni, afhængigt af klientens behov. Standardindstillingen er "Locator". Klik på **Næste**.



4. Når matchningen er færdig, anbefaler vi, at du lader brugeren vurdere BiCROS løsningen i demonstrationstilstand. Klik på **Start**.



5. Følg trinene i demonstrationstilstanden:
- I. Sørg for, at høreapparatet og WIDEX CROS er placeret korrekt i brugerens øre.
 - II. Aktiver WIDEX CROS ved at trykke på program-knappen.
 - III. Lad klienten vurdere lyden fra WIDEX CROS og høreapparatet. Sørg for, at de kan høre lyd på begge sider af hovedet. De skal fokusere på lydbalancen mellem høreapparatet og WIDEX CROS og på høreapparatets generelle lyd kvalitet i øret med bedre hørelse.
 - IV. Deaktiver WIDEX CROS ved at trykke på program-knappen igen.
 - V. Klik på knappen **Stop demonstrationstilstanden**.



6. Hvis du ønsker at justere lydstyrkeforholdet mellem høreapparatet i øret med bedre hørelse og WIDEX CROS, kan du bruge skyderen til indstilling af mikrofonens balance under **Håndtering**. Hvis du ønsker at foretage mere generelle justeringer af lyden, skal du gå til **Finjustering**.




7. Hvis du har foretaget justeringer, skal du åbne demonstrationstilstanden igen for at give klienten mulighed for at vurdere den justerede lyd.

TILPASNING AF WIDEX CROS CROS LØSNINGEN - TRIN FOR TRIN

CROS LØSNING

1. Tilslut og detekter høreapparatet i øret med bedre hørelse.
2. Gå direkte til **Håndtering**, klik på CROS/BiCROS og start matchningen.
3. Klik på **CROS** og definer mikrofoningstillingen – Locator eller Locator Omni, afhængigt af klientens behov. Bemærk, at mikrofonerne på høreapparatet i øret med bedre hørelse altid er slået fra, når WIDEX CROS bruges. Klik på **Næste** for at matche WIDEX CROS.
4. Lad klienten vurdere lyden fra WIDEX CROS og høreapparatet i demonstrationstilstand (som beskrevet i trin 5 på den foregående side). Bed klienten om at fokusere på den generelle lyd kvalitet i høreapparatet i øret med bedre hørelse.
5. Om nødvendigt kan du justere forstærkningen af den lyd, der kommer fra WIDEX CROS, ved hjælp af værktøjet "**transmitteret lydstyrkejustering**".

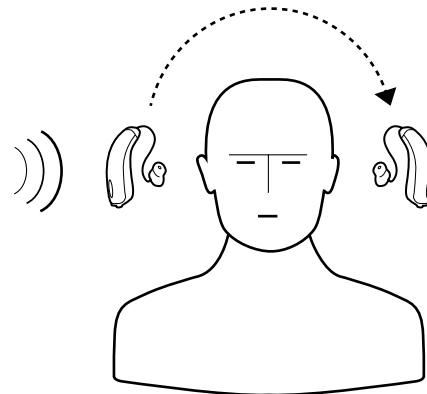





Ved at vælge Widex høreapparater vælger du produkter fra en WindMade certificeret virksomhed. WindMade er det første globale forbrugermærke til identifikation af virksomheder, som anvender vindenergi.

WIDEX er et varemærke registreret af Widex A/S.



Trykt af KLS/2017-02
9 502 3764 010 #03